



# nuevo dispositivo con MANGUITO AUTOPRESURIZADO

**El nuevo air-Q<sub>sp</sub> elimina el paso adicional y las conjeturas sobre el inflado del manguito de la mascarilla y evita el riesgo de sobreinflado.**

El nuevo diseño permite que la ventilación de presión positiva autopresurice el manguito de la mascarilla. El aumento de presión en el sellado sucede en el momento exacto en que lo necesita, durante el movimiento ascendente de ventilación.

**En la exhalación, el manguito se desinfla al nivel de la PEEP.**

La presión del interior del manguito cicla entre la presión pico, generalmente entre 15 - 30 cm H<sub>2</sub>O y el nivel de PEEP < 10 cm H<sub>2</sub>O.

**Resultados . . . un sello más seguro, eficaz, de baja presión durante la mayoría de los casos. La bajada cíclica de la presión en el manguito puede ayudar a disminuir complicaciones como:**

Traumatismo mucoso y nervioso que resultan de inflar en exceso los manguitos de las mascarillas laríngeas.

**Permite la intubación igual que el air-Q® regular, la versión SP puede usarse como dispositivo de uso rutinario que facilita la intubación.**



El conector desmontable codificado por color facilita la intubación.



# nuevo dispositivo con AUTO PRESURIZACIÓN

## 6 tamaños disponibles



1.0 desechable  
air-Q<sub>sp</sub>

1.5 desechable  
air-Q<sub>sp</sub>

2.0 desechable  
air-Q<sub>sp</sub>

2.5 desechable  
air-Q<sub>sp</sub>

3.5 desechable  
air-Q<sub>sp</sub>

4.5 desechable  
air-Q<sub>sp</sub>

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia	Tamaño	Descripción	Peso del paciente
1006-M	#00	Prolongador de retirada desechable para mascarillas de tamaño 1.0 y 1.5	
1005-M	#0	Prolongador de retirada desechable para mascarillas de tamaño 2.0 y 2.5	
1004-M	#1	Prolongador de retirada desechable para mascarillas de tamaño 3.5 y 4.5	
4010-M	10	Mascarilla Laríngea desechable air-Q SP, conector azul claro	<7 kg
4015-M	15	Mascarilla Laríngea desechable air-Q SP, conector verde claro	7 - 17 kg
4020-M	20	Mascarilla Laríngea desechable air-Q SP, conector naranja	17 - 30 kg
4025-M	25	Mascarilla Laríngea desechable air-Q SP, conector amarillo	30 - 50 kg
4035-M	35	Mascarilla Laríngea desechable air-Q SP, conector rojo	50 - 70 kg
4045-M	45	Mascarilla Laríngea desechable air-Q SP, conector morado	70 - 100 kg



# nuevo dispositivo con AUTO PRESURIZACIÓN

## 7 tamaños disponibles



0.5 reutilizable  
air-Q<sub>sp</sub>

1.0 reutilizable  
air-Q<sub>sp</sub>

1.5 reutilizable  
air-Q<sub>sp</sub>

2.0 reutilizable  
air-Q<sub>sp</sub>

2.5 reutilizable  
air-Q<sub>sp</sub>

3.5 reutilizable  
air-Q<sub>sp</sub>

4.5 reutilizable  
air-Q<sub>sp</sub>

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia	Tamaño	Descripción	Peso del paciente	Tamaño Máximo TET
1006-M	#00	Prolongador de retirada desechable para mascarillas de tamaño 1,0 y 1,5		
1005-M	#0	Prolongador de retirada desechable para mascarillas de tamaño 2,0 y 2,5		
1004-M	#1	Prolongador de retirada desechable para mascarillas de tamaño 3,5 y 4,5		
6005-M	0,5	Mascarilla Laríngea reutilizable air-Q SP, conector rosa	< 4 kg	4,0
6010-M	1,0	Mascarilla Laríngea reutilizable air-Q SP, conector azul	4 - 7 kg	4,5
6015-M	1,5	Mascarilla Laríngea reutilizable air-Q SP, conector verde	7 - 17 kg	5,0
6020-M	2,0	Mascarilla Laríngea reutilizable air-Q SP, conector naranja	17 - 30 kg	5,5
6025-M	2,5	Mascarilla Laríngea reutilizable air-Q SP, conector amarillo	30 - 50 kg	6,5
6035-M	3,5	Mascarilla Laríngea reutilizable air-Q SP, conector rojo	50 - 70 kg	7,5
6045-M	4,5	Mascarilla Laríngea reutilizable air-Q SP, conector morado	70 - 100 kg	8,5